

NANO FIBER MASK B



Virus and Bacteria Filtration



4 ply




Zdravotnická obličejová maska s filtrem z nanovláken, s gumičkou, čtyřvrstvá, nesterilní.

Chrání proti šíření virové a bakteriální infekce filtrační funkcí materiálu masky.

Filtruje viry a bakterie.

**Bakteriální filtrační účinnost (BFE) $\geq 98\%$
Účinně filtruje částice o velikosti viru.**

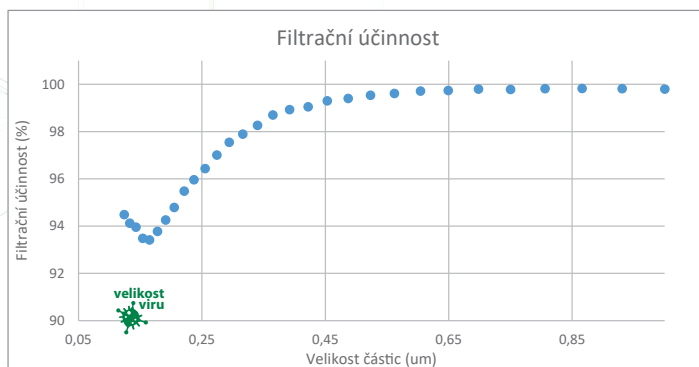

**Výrobek je určen k jednorázovému použití.
Při opakovaném použití hrozí riziko kontaminace a může dojít ke zhoršení účinnosti masky.**

Pokyny pro nasazení

Před nasazením mějte vždy čisté ruce.

Jak se nasazuje maska s gumičkami:

1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než vezmete masku do ruky, použijte dezinfekci na ruce.
2. Vyjměte masku z krabice a ujistěte se, že není ani z jedné strany natržená nebo protržená.
3. Zjistěte, která strana masky patří nahoru. Nahoru patří ta strana masky, která má vyztužený ohybatelný okraj, který se má přizpůsobit tvaru nosu.
4. Držte masku za poutka. Zahákněte poutka za uši.
5. Vyztužený okraj vytvarujte podle tvaru svého nosu.
6. Přetáhněte spodní okraj masky přes ústa a bradu.



Jak se sundává maska s gumičkami:

Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Utřete si ruce a předtím, než na masku sáhnete, použijte dezinfekci na ruce. Nedotýkejte se přední strany masky. Přední strana masky je kontaminovaná. Dotýkejte se pouze gumiček.

1. Uchopte obě gumičky a opatrně zvedněte a sejměte masku. Snažte se nedotýkat se přední strany masky a držte ji pouze za gumičky.
2. Vyhodte masku do odpadu.
3. Umyjte si ruce vodou a mýdlem.
4. Utřete si ruce a použijte dezinfekci na ruce.

Jednorázové masky by měly být používány pouze jednou a poté vyhozeny do odpadu. Masku byste měli sundat a vyměnit také v případě, že je vlhká.