


# DEXELL®

## DXL-5010

### 1 ml DEXELL VUR zawiera:

Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego	15 mg
Dextranomer	50 mg
Chlorek sodu	6,9 mg
Woda do iniekcji	ad 1 ml

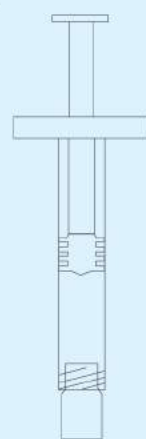

DEXELL jest jałowym, lepkiem żelem zawierającym zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego.


Jest biokompatybilnym i biodegradowalnym środkiem do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych.

Usieciowany kwas hialuronowy (hylan żel) jest nośnikiem dla mikrocząstek dekstranomeru.

Mikrocząstki dekstranomeru stymulują tkankę łączną w miejscu wstrzyknięcia. Zarówno żel hylan i mikrocząstki dekstranomeru w DEXELL ulegają biodegradacji i są biokompatybilne.

DEXELL VUR jest wskazany do czasowego zastąpienia objętości w drodze iniekcji podśluzowej w leczeniu refluksu pęcherzowo-moczowodowego (VUR)

### Aplikacja:

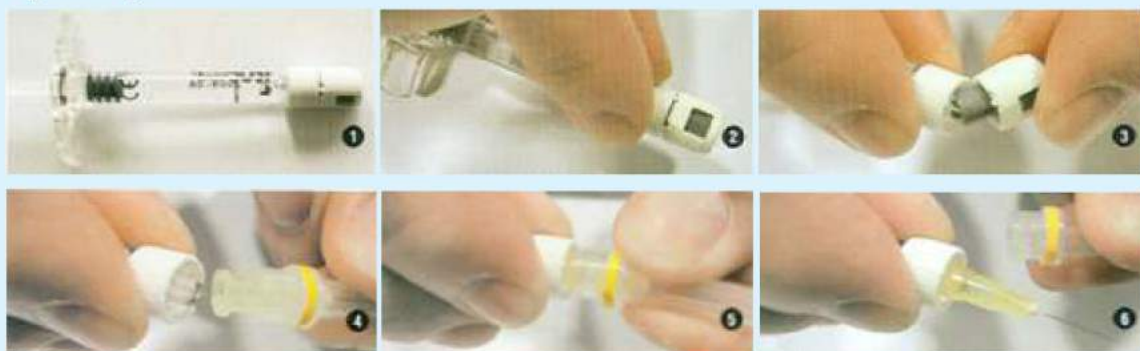

1. Wyjąć z opakowania strzykawkę z nasadką zamykającą
2. Trzymać strzykawkę za pierścień adaptera pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym
3. Odłamać zatyczkę adaptera niezbyt silnym ruchem
4. Trzymając pierścień adaptera pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym nałożyć końcówkę igły
5. Przekręcić igłę w adapterze Luer-Lock
6. Trzymając pierścień adaptera ściągnąć w dół zabezpieczenie igły

**Istem**  
ISTEM MEDICAL


**Wytwórca**  
ISTEM MEDICAL TIBBİ CİHAZ VE SAN.  
LTD.ŞTİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,661  
SOKAK NO. 4 OSTİM, 06370 ANKARA/  
TURCJA

**batist.**  
MEDICAL

**Importer i dystrybutor:**  
Batist Medical Polska Spółka z o.o.  
ul. Kolistka 25  
40-486 Katowice/ POLSKA  
www.batistmedical.com



CE 1783

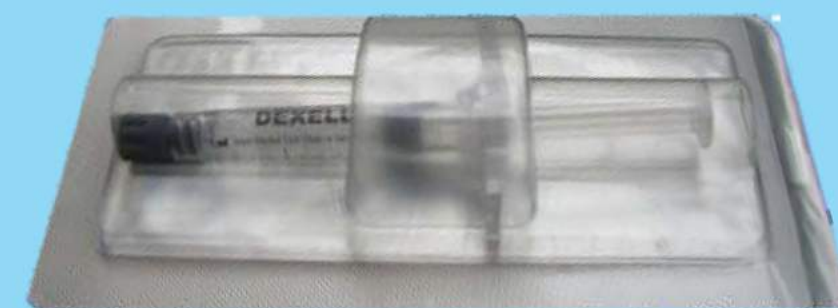

# DEXELL®

## Złoty standard w leczeniu VUR