


LUBRAGEL



LUBRAGEL

Sterylny żel lubrykacyjny z lidokainą

LUBRAGEL

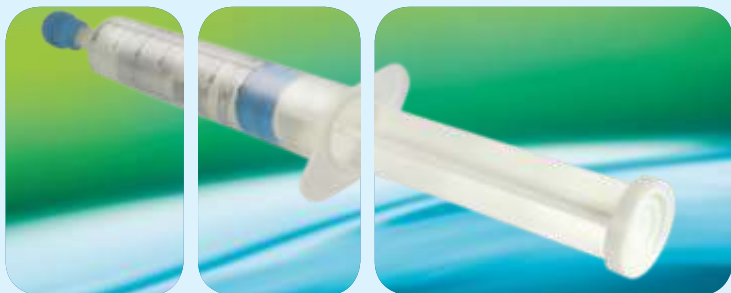

CO TO JEST LUBRAGEL

LUBRAGEL jest sterylnym, rozpuszczalnym w wodzie żelem, używanym do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia. Oprócz tego może być stosowany do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Zawartość środków antyseptycznych ma zapobiegać powstawaniu i rozwojowi zakażeń, mogących pojawić w efekcie powikłań wymienionych zabiegów. Zawartość substancji poślizgowych znacznie ułatwia wprowadzanie różnego typu narzędzi i cewników. Zawartość środka znieczulającego ma zapewniać brak typowej bolesności podczas procedur.



JAK STOSOWAĆ LUBRAGEL?

LUBRAGEL dostępny jest w dwóch ampułko-strzykawkach 6ml i 11ml. Opakowanie zużywa się w całości zależnie od procedury dla której żel jest stosowany. W celu użycia produktu należy oderwać papier ochronny, który zapewnia produktowi sterylność. Przed zdjęciem niebieskiego korka, należy delikatnie poruszać tłokiem naciskając go. Następnie zdjąć niebieski korek. Użyć żelu w celu znieczulenia obszaru proceduralnego delikatnie wyciskając go ze strzykawki. Środek zaczyna działać ok. 5 min po aplikacji. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją stosowania LUBRAGEL, dołączoną do każdego opakowania



Wytwórca
ISTEM MEDIKAL TIBBİ CİHAZ VE SAN. LTD.ŞTİ.
ANADOLU OSB MAH.39 EKİM CAD NO. 39
MALIKOY-SINCAN, 06909 ANKARA/
TURCJA



Importer :
Batist Medical Polska Spółka z o.o.
ul. Kolisty 25
40-486 Katowice/ POLSKA
www.batistmedical.com

