

PREVENCE INFEKCE

Dezinfikování povrchů – vlhčené ubrousky



DEZINFEKČNÍ UBROUSKY



Dezinfekční ubrousky poskytují perfektní flexibilitu. Účinné chemické složení zajišťuje širokou účinnost, což je ideální pro povrchy a neinvazivní zdravotnické prostředky.

- Ideální pro všechny povrchy vyrobené z materiálů, které nejsou rezistentní vůči alkoholu.
- Používají se k souběžnému čištění a dezinfekci povrchů.
- Ubrousky pro dezinfikování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.
- Ubrousky bez obsahu alkoholu.
- Pro dezinfikování všech dotykových povrchů.
- Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
- Mikrobiologická aktivita od 1 minuty proti bakteriím, kvasinkám a plísním, mykobakteriím a virům (včetně koronaviru).

Aktivní složky:

N,N-didecyl-N,N-dimethylamoniumchlorid
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamin

Návod k použití:

K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.

Balení:



REF: 1320100497

Kód produktu: S524110MPCE

Dezinfekční ubrousky Medipal 50 ks
v uzavíratelném plastovém sáčku 24 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 200 x 175 mm



REF: 1320100498

Kód produktu: S524110MPCE

Dezinfekční ubrousky Medipal 200 ks
v uzavíratelném plastovém sáčku 6 ks v krabici.
Rozměr ubrousku: 250 x 200 mm

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otevření 1 měsíc.

PREVENCE INFEKCE

Dezinfikování povrchů – vlhčené ubrousky



UBROUSKY S ALKOHOLEM

Tyto vysoce účinné univerzální ubrousky obsahují isopropylalkohol (IPA). Jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu neuvolňujícího vlákna a umožňují kontrolované uvolňování roztoku s cílem zajistit optimální dezinfekční účinek v každém ubrousku.

- Ubrousky pro dezinfikování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.
- Ideální pro všechny povrchy vyrobené z materiálů, které jsou rezistentní vůči alkoholu.
- Obsahují 70% isopropylalkohol.
- Nezaněchávají šmouhy.
- Pro dezinfikování všech dotýkových povrchů a drobného neinvazivního zdravotnického vybavení.
- Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
- Mikrobiologická aktivita za 60 sekund proti bakteriím, kvasinkám, mykobakteriím a virům (včetně norovirů).

Aktivní složky:

Isopropanol 70% obj.

Návod k použití:

K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Nepoužívejte na površích, které nejsou odolné vůči alkoholu. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte na pacientech a na invazivních prostředcích. Po použití nechte povrch před dalším použitím uschnout. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.

Balení:



REF: 1320100495

Kód produktu: W600110MPCE

Dezinfekční ubrousky Medipal 200 ks
v uzavíratelné dóze 10 ks v krabici.

Rozměr ubrousku: 195 x 190 mm

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otevření 6 měsíců.

PREVENCE INFEKCE

Dezinfikování povrchů – vlhčené ubrousky



UBROUSKY S CHLOREM



Naše ubrousky s chlorem, jsou méně toxické a méně žíravé než jiné přípravky na bázi chloru, přesto však vykazují rychlou biocidní účinnost proti širokému spektru mikroorganismů a spor na neporézních pevných površích, vybavení a neinvazivních zdravotnických prostředcích.

- Ubrousky pro dezinfikování neporézních pevných povrchů, vybavení a neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.
- Rychlý biocidní účinek proti širokému spektru mikroorganismů a spor.
- Testované v souladu s normou EN 16615 – „zkouška na 4 polích“.
- Mikrobiologická aktivita za 60 sekund proti bakteriím, mykobakteriím a virům (včetně koronaviru).
- Plné spektrum mikrobiologické účinnosti včetně spor do 2 minut.

Aktivní složky:

chlornan sodný

Návod k použití:

Používejte ochranné rukavice. K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Po použití nechte povrch před dalším použitím uschnout. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.

Balení:



REF: 1320100496

Kód produktu: S570110MPCE

Dezinfekční ubrousky s chlorem Medipal 50 ks v uzavíratelném plastovém sáčku 12 ks v krabici. Rozměr ubrousku: 200 x 200 mm

Doba trvanlivosti 1 rok. Po otevření 1 měsíc.

PREVENCE INFEKCE

Dezinfikování povrchů – vlhčené ubrousky




Mikroorganismus	UBROUSKY BEZ ALKOHOLU		UBROUSKY S ALKOHOLEM
	Dezinfekční ubrousky	Ubrousky s chlorem	Ubrousky se 70% alkoholem
Baktericidní účinnost	Doba působení		
EN 13727	30 s	1 min	1 min
EN 13697	1 min	2 min	30 s
EN 16615	1 min	1 min	1 min
Účinnost proti kvasinkám			
EN 13624	1 min	2 min	1 min
EN 13697	1 min	2 min	
EN 16615	1 min	1 min	1 min
EN 14562	2 min		
Účinnost proti plísním			
EN 13624		2 min	
Mykobaktericidní účinnost			
EN 14348	1 min	1 min	1 min
EN 14563	1 min		1 min
Virucidní účinnost			
EN 14476			
Obalené viry	1 min	1 min	5 min
Omezená virucidní účinnost	1 min	1 min	1 min*
Plná virucidní účinnost	2 min	1 min	
Sporicidní účinnost			
EN 13704			
Clostridium difficile		2 min	
Clostridium sporogenes		2 min	
Bacillus subtilis		2 min	
Bacillus cereus		2 min	


*Myší norovirus

Návod k použití:


- KROK 1** Dodržujte schválené pokyny politiky posuzování rizik, co se týče používání OOP.
- KROK 2** Zvolte typ dávkovače a vyjměte ubrousek.
- KROK 3** Otírejte povrch tak, že ubrouskem budete kreslit písmeno S, přičemž se pohybujte z čisté oblasti do znečištěné. Ubrousek používejte rozložený, nemačkejte. Neotírejte stejnou část dvakrát stejným ubrouskem.
- KROK 4** Jakmile se ubrousek zašpiní, použijte nový.
- KROK 5** Použité ubrousky vyhodte do vhodného odpadkového koše a dodržujte platné místní předpisy.
- KROK 6** Povrch nechte před použitím uschnout.

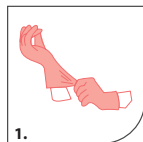


1.

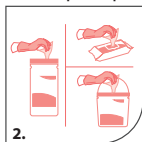


2.

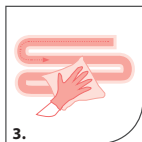


3.

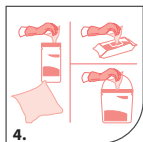

4.

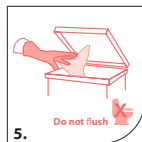

5.

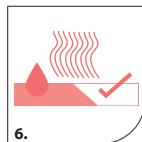

6.