

PREVENIA INFEKIE

Dezinfikovanie povrchov – vlhčené obrúsky



DEZINFEKČNÉ OBRÚSKY



Účinné proti
koronavírusu

Dezinfekčné obrúsky poskytujú perfektnú flexibilitu. Účinné chemické zloženie zaručuje širokú účinnosť, čo je ideálne pre povrchy a neinvazívne zdravotnícke pomôcky.

- Ideálne pre všetky povrchy vyrobené z materiálov, ktoré nie sú rezistentné voči alkoholu.
- Používajú sa na súbežné čistenie a dezinfekciu povrchov.
- Obrúsky na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú pripravené na použitie.
- Obrúsky bez obsahu alkoholu.
- Na dezinfekciu všetkých dotykových povrchov.
- Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
- Mikrobiologická aktivita od 1 minúty proti baktériám, kvasinkám a plesniam, mykobaktériám a vírusom (vrátane koronavírusu).

Aktívne zložky:

N,N-didecyl-N,N-dimetylammóniumchlorid
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamín

Návod na použitie:

Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch nechajte uschnúť. V prípade silno znečistených povrchov môžete potrebovať viac obrúskov. Obrúsky nepoužívajte opakovane. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:



REF: 1320100497

Kód produktu: S524110MPCE

Dezinfekčné obrúsky Medipal 50 ks v uzatvárateľnom plastovom vrecku (50 obrúskov v uzatvárateľnom plastovom vrecku), 24 ks v krabici. Rozmer obrúsku: 200 x 175 mm



REF: 1320100498

Kód produktu: S522110MPCE

Dezinfekčné obrúsky Medipal 200 ks v uzatvárateľnom plastovom vrecku (200 obrúskov v uzatvárateľnom plastovom vrecku), 6 ks v krabici. Rozmer obrúsku: 250 x 200 mm

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otvorení 1 mesiac.

PREVENIA INFEKČIE

Dezinfikovanie povrchov – vlhčené obrúsky



OBRÚSKY S ALKOHOLOM

Tieto vysoko účinné univerzálne obrúsky obsahujú izopropylalkohol (IPA). Sú vyrobené z materiálu, ktorý púšťa minimálne množstvo vlákien a umožňuje kontrolované uvoľňovanie roztoku s cieľom zabezpečiť optimálny dezinfekčný účinok v každom obrúsku.

- Obrúsky na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú pripravené na použitie.
- Ideálne na všetky povrchy vyrobené z materiálov, ktoré nie sú rezistentné voči alkoholu.
- Obsahujú 70% izopropylalkohol.
- Na povrchoch nezanechávajú šmuhy.
- Na dezinfikovanie všetkých dotýkových povrchov a drobného neinvazívneho zdravotníckeho vybavenia.
- Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
- Mikrobiologická aktivita za 60 sekúnd proti baktériám, kvasinkám, mykobaktériám a vírusom (vrátane norovírusov).

Aktívne zložky:

Izopropanol 70% obj.

Návod na použitie:

Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch nechajte uschnúť. V prípade silno znečistených povrchov môžete potrebovať viac obrúskov. Nepoužívajte na povrchoch, ktoré nie sú odolné voči alkoholu. Obrúsky nepoužívajte opakovane. Nepoužívajte na pacientoch a na invazívnych prostriedkoch. Po použití nechajte povrch pred ďalším použitím uschnúť. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:



REF: 1320100495

Kód produktu: W600110MPCE

Dezinfekčné obrúsky Medipal 200 ks v uzatvárateľnej dóze (200 obrúskov v uzatvárateľnej dóze). 10 ks v krabici.

Rozmer obrúsku: 195 x 190 mm

Doba trvanlivosti 3 roky. Po otvorení 6 mesiacov.

PREVENIA INFEKIE

Dezinfikovanie povrchov – vlhčené obrúsky



OBRÚSKY S CHLÓROM



Účinné proti
koronavírusu

Naše obrúsky s chlóróm, ktoré sú pripravené na použitie, sú menej toxické a menej žieravé ako iné prípravky na báze chlóru, napriek tomu však vykazujú rýchlu biocídnu účinnosť proti širokému spektru mikroorganizmov a spór na neporéznych pevných povrchoch, vybavení a neinvazívnych zdravotníckych pomôckach.

- Obrúsky na dezinfekciu neporéznych pevných povrchov, vybavenia a neinvazívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú pripravené na použitie.
- Rýchly biocídny účinok proti širokému spektru mikroorganizmov a spór.
- Testované v súlade s normou EN 16615 – „skúška na štyroch poliach“.
- Mikrobiologická aktivita za 60 sekúnd proti baktériám, mykobaktériám a vírusom (vrátane koronavírusu).
- Celé spektrum mikrobiologickej účinnosti vrátane spór do 2 minút.

Aktívne zložky:

chlórnan sodný

Návod na použitie:

Používajte ochranné rukavice. Na dezinfekciu povrchu použite jeden obrúsok. Povrch nechajte uschnúť. V prípade silno znečistených povrchov môžete potrebovať viac obrúskov. Obrúsky nepoužívajte opakovane. Po použití nechajte povrch pred ďalším použitím uschnúť. Dodržiavajte čas pôsobenia, aby ste dosiahli mikrobiologický účinok.

Balenie:



REF: 1320100496

Kód produktu: S570110MPCE

Dezinfekčné obrúsky s chlóróm Medipal 50 ks v uzatvárateľnom plastovom vrecku (50 obrúskov v uzatvárateľnom plastovom vrecku). 12 ks v krabici. Rozmer obrúsku: 200 x 200 mm

Doba trvanlivosti 1 rok. Po otvorení 1 mesiac.

PREVENIA INFEKIE

Dezinfikovanie povrchov – vlhčené obrúsky




Mikroorganizmus	OBRÚSKY BEZ ALKOHOLU		OBRÚSKY S ALKOHOLOM
	Dezinfekčné obrúsky Medipal	Dezinfekčné obrúsky s chlóróm Medipal	Obrúsky so 70% IPA Medipal
Baktericídna účinnosť	Čas pôsobenia		
EN 13727	30 s	1 min	1 min
EN 13697	1 min	2 min	30 s
EN 16615	1 min	1 min	1 min
Účinnosť proti kvasinkám			
EN 13624	1 min	2 min	1 min
EN 13697	1 min	2 min	
EN 16615	1 min	1 min	1 min
EN 14562	2 min		
Účinnosť proti plesniam			
EN 13624		2 min	
Mykobaktericídna účinnosť			
EN 14348	1 min	1 min	1 min
EN 14563	1 min		1 min
Virucidná účinnosť			
EN 14476			
Obalené vírusy	1 min	1 min	5 min
Obmedzená virucidná účinnosť	1 min	1 min	1 min*
Úplná virucidná účinnosť	2 min	1 min	
Sporicídna účinnosť			
EN 13704			
Clostridium difficile		2 min	
Clostridium sporogenes		2 min	
Bacillus subtilis		2 min	
Bacillus cereus		2 min	


*Myší norovírus

Návod na použitie:


- KROK 1** Dodržiavajte schválené pokyny politiky posudzovania rizík, pokiaľ ide o používanie OOP.
- KROK 2** Zvoľte si typ dávkovača a vyberte obrúsk.
- KROK 3** Utierajte povrch tak, že obrúskom budete kresliť písmeno S, pričom sa pohybuje z čistej oblasti do znečistenej. Obrúsk používajte rozložený, nekrčte ho. Neutierajte rovnakú časť dvakrát rovnakým obrúskom.
- KROK 4** Len čo sa obrúsk zašpiní, použite nový.
- KROK 5** Použitý obrúsk vyhodte do vhodného odpadkového koša a dodržiavajte platné miestne predpisy.
- KROK 6** Povrch nechajte pred použitím uschnúť.

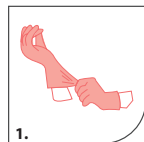


1.

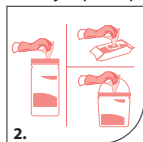


2.

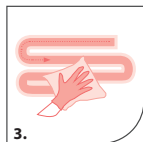

3.

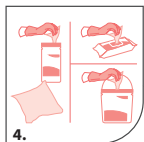


4.

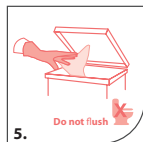

5.

Do not flush

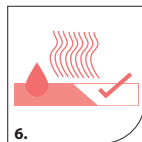

6.