



CHRÁŇME SA

C VID¹⁹

RESPIRÁTOR triedy ochrany FFP3

- Vyrobený **z piatich vrstiev** netkaného materiálu, vrátane dvoch samostatných vrstiev netkaného textilu meltbown, ktoré tvoria filtračný materiál. Celková gramáž je 160 g/m²
- Ľahký, priedušný a hypoalergénny materiál **s vysokou filtračnou účinnosťou ≥99 %**
- Pohodlná integrovaná výstuha na nos a pružná mäkká gumička zabezpečujú komfortné nosenie a dokonalú tesnosť respirátora, **šetrný k pokožke**
- Ľahké dýchanie vďaka nízkemu tlakovému odporu, bez výdychového ventila



FFP3 - trieda ochrany
NR - len na jednorazové použitie



Inštrukcie na nasadenie respirátora:

1. Vyjměte respirátor z obalu, rozbalte ho a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu. Nasadte si respirátor na bradu. Nosní výztuha by měla být nahoře.
2. Přetáhněte horní gumičku přes hlavu a umístěte ji na temeno hlavy.
3. Přetáhněte spodní gumičku přes hlavu a umístěte ji za krk. Upravte obě gumičky tak, aby pohodlně seděly.
4. Nosní výztuhu prsty vytvarujte podle kořene nosu, aby respirátor správně seděl. Vždy zkontrolujte, zda respirátor správně těsní. Pokud kolem nosu nebo po stranách respirátoru uniká vzduch, upravte nosní výztuhu nebo nasazení respirátoru.



Podrobný návod na použití nájdeťte vo vnútri balenia.

REF: 1320100799

Balené po 50 ks

Osobný ochranný prostriedok kat. III. podľa nariadenia EÚ 2016/425
Splnenie všetkých požiadaviek normy EN 149: 2001 + AC: 2009