

TEST PRZESIEWOWY NA COVID-19



SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG to test immunologiczny mający na celu wykrycie przeciwciał IgM lub IgG przeciwko COVID-19 w ludzkiej krwi.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeznaczone do użytku przez profesjonalnego użytkownika
- Ewentualna diagnoza kliniczna powinna zostać potwierdzona przez specjalistę na podstawie dodatkowych badań i innych metod badawczych



Zawartość zestawu

Zestaw testowy	Kasetka testowa	5 szt
	Płyn buforowy (butelka 1 ml)	1 szt
	Instrukcja użytkownika	1 szt
Produkty do pobrania krwi z palca	Lancet	5 szt
	Gazik nasączony alkoholem	5 szt
	Pipeta pettyPip	5 szt

- Produkt posiada Certyfikat FDA
- Szybki test do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2
- wynik do 10 minut
- Kompletny zestaw – nie ma konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów
- Potrzeba jedynie 10 µl krwi pobranej z palca

Krew pobrana z palca daje tę samą skuteczność kliniczną podczas wykonywania badania, co krew / surowica pobrana z żyły.

CAŁOŚĆ	Krew pobrana z żyły			
	Pozytywny	Negatywny	Łącznie	
Krew pobrana z palca	Pozytywny	30	0	30
	Negatywny	0	30	0
	Łącznie	30	30	60

Doskonałe rezultaty

CAŁOŚĆ	RT-PCR w czasie rzeczywistym			
	Pozytywny	Negatywny	Łącznie	
SGTi-flex COVID-19 IgM/IgG	Pozytywny	154	6	160
	Negatywny	9	354	363
	Łącznie	163	360	523

- Czulość: 94,48% (95% przedział ufności: 89,84-97,07%)
- Swoistość: 98,33% (95% przedział ufności: 96,41-99,23%)

Specyfikacja

Informacje	Szczegóły
Czas, w którym należy odczytać wynik	10-15 min.
Typ próbki	krew
Przechowywanie	2-30 °C (36-86 °F)
Oznaczenie katalogowe	COVT005E

Tylko do użytku profesjonalnego.