


WANTAI SARS-COV-2

Rychlotest Ag (metoda s koloidním zlatem)

(Výtěr z nosohltanu a vzorek slin)


Návod k použití

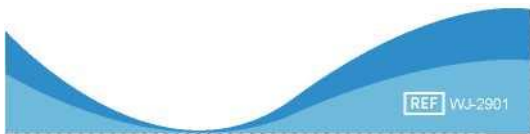

První krok: Odeberte vzorek


- Otevřete sáček s tampónovou tyčinkou.
- Můžete si zvolit ze dvou druhů vzorků k odběru:

Výtěr z nosohltanu: Zasuňte celou tampónovou část tyčinky do nosní dírky a pomalu s ní krouživým pohybem otáčejte po vnitřních stěnách každé z obou nosních dutin.

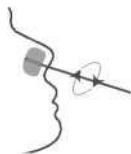

nebo

Vzorek slin: Zasuňte celou tampónovou část tyčinky do úst a pomalu setřete horní patro a vnitřek levé i pravé lícní stěny (ujistěte se, že jste odebrali vzorek slin, které se uchytily na tampónu).

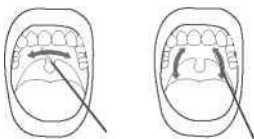


Příprava

- Před provedením testu si pozorně přečtěte návod k použití.
- Vyjměte všechny součásti testovací sady a položte je na stůl.

Součásti testovací sady:

- 1 x Testovací kazeta
- 1 x Jednorázová sterilní tampónová tyčinka
- 1 x Extrakční zkumavka (0,3 mL)
- 1 x Uzavíratelný plastový sáček

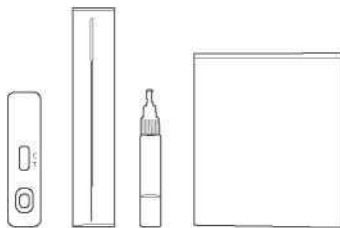

Načtením QR kódu si můžete přehrát instruktážní video.



Druhý krok Extrakce vzorku

- Odšroubujte víčko extrakční zkumavky.
- Vložte tampónovou tyčinku se vzorkem do extrakční zkumavky s roztokem a důkladně tyčinkou otáčejte, aby se s ním vzorek dobře promíchal.




- Tlačte tampónovou tyčinkou proti stěně zkumavky, abyste z tampónu vytlačili tekutinu.



Třetí krok: Odstraňte tyčinku tampónu

- Ve vyznačeném místě ulomte tyčinku tampónu a ponechte tampón ve zkumavce.

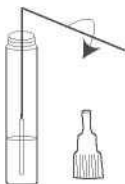


- Pevně zašroubujte víčko zkumavky. Ulomte špičku extrakční zkumavky.




Čtvrtý krok: Testování

- Otevřete sáček s testovací kazetou a položte kazetu na rovný povrch.

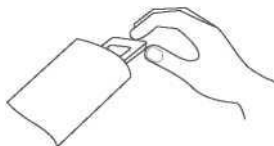

- Vymáčkněte z extrakční zkumavky tři (3) kapky odebraného vzorku do otvoru na testovací kazetě. Počkejte 15 minut.

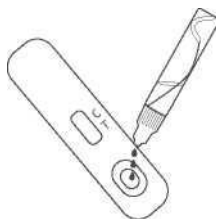

Pátý krok Zjistěte výsledek

- Po 15 minutách, ne však déle než po 30 minutách, od nakapání vzorku do otvoru kazety zjistěte výsledek.



Likvidace sady

- Všechny součásti vložte do přiloženého uzavíratelného sáčku. Sáček uzavřete a vyhoďte do koše.



Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
Č.31 Kexueyuan Road, okres Changping, Peking 102206, Čína
Tel: +86 10 59528888 | Fax: + 86 10 89705849 | Web: www.wstwt.com
[EK]REPI Evropské zastoupení: Qarad BV, Cijpestraat3,2440 Geel, Belgie