







## GR - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

**FLOWER** - εξεταστικά γάντια νηρίλυο, χωρίς πόυδρα, μπλε, μαύρα, μη αποστειρωμένα Διαθέσιμα μεγέθη: XS, S, M, L, XL.

**1) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα**

- α) Το προϊόν ταξινομείται ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι σύμφωνα με τους κανόνες 1 και 5 του Παράρτηματος ΙΧ και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
β) Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 και EN 455-4:2009.

**2) Εξέταση τύπου ΕΕ για εξοπλισμό ατομικής προστασίας**

- α) Το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και η συμμόρφωσή του με τον εν λόγω κανονισμό έχει αποδειχθεί μέσω των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων EN ISO 21420, EN ISO 374-1,2 4,5
β) Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση είναι η SATRA Technology Europe Limited (2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland.
γ) Ο κοινοποιημένος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής μαζί με τους εποπτευόμενους ελέγχους προϊόντων σε τυχαία διαστήματα (ενότητα C2) είναι η SATRA Technology Europe Limited (2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland.
δ) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.batist.com

**3) Επισήμανση**

- α) Προειδοποιητικό σύμβολο κινδύνου που προκαλείται από μικροοργανισμούς EN ISO 374-5:2016 προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς. Το δείγμα είναι ανθεκτικό στη διεύθυνση βακτηριοφάγου και θα χρησιμοποιηθεί αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο.

- β) Σύμβολο προειδοποίησης χημικού κινδύνου: EN 16523-1:2015; περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντοχή στα χημικά μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή.

*Τα επίπεδα διείσδυσης EN ISO 374-1:2016 βασίζονται σε αυτούς τους χρόνους διείσδυσης:*

Διείσδυση Επίπεδο αποτελεσματικότητας	1	2	3	4	5	6
Μετρημένος χρόνος διείσδυσης (ελάχιστο)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις για τον τύπο Β και αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο χρησιμοποιείται με αναφορά στην ενότητα 6.2 του ISO 374-1.



**4) Αποτελεσματικότητα και περιορισμοί χρήσης**

- α) Το προϊόν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 374-5:2016. Προστασία από βακτήρια και μύκητες – πέραςε Προστασία από ιούς - πέραςε
β) Τα γάντια δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 16523-1:2015 για αντοχή στη διείσδυση χημικών ουσιών και πέτυχαν τα ακόλουθα επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Χημικά	Επίπεδο αποτελεσματικότητας
40% υδροξείδιο του νατρίου (Κ)	6
37% φορμαλδευδη (Τ)	5
30% υπεροξείδιο του υδρογόνου (Ρ)	2

- ι) Αυτές οι πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό χρόνο προστασίας στο χώρο εργασίας και τις διαφορές μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών.
ιι) Η χημική αντοχή έχει αξιολογηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που έχουν ληφθεί μόνο από την παλάμη (εκτός από τις περιπτώσεις που το γάντι έχει μέγεθος 400 mm ή περισσότερο, όπου έχει δοκιμαστεί και η περικόρπιο) και ισχύει μόνο για τις χημικές ουσίες που έχουν δοκιμαστεί. Μπορεί να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα.
iii) Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για το σκοπό τους, καθώς οι συνθήκες στο χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τον τύπο της δοκιμής ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την αλλοίωση.
iv) Τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντοχή σε επικίνδυνα χημικά κατά τη χρήση λόγω αλλαγής των φυσικών ιδιοτήτων. Η πραγματική διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί σημαντικά λόγω κίνησης, σκισήματος, τριβής και αλλοίωσης που προκαλείται από την επαφή με το χημικό κ.λπ. Στην περίπτωση των διαβρωτικών

χημικών ουσιών, η αλλοίωση μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή γαντιών ανθεκτικών στις χημικές ουσίες.

- ν) Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες.
γ) Το προϊόν έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-4:2013 και πέτυχε τα ακόλουθα αποτελέσματα όσον αφορά το επίπεδο αλλοίωσης:

Χημικές ουσίες	Μέση τιμή αποδόμησης / %
40% υδροξείδιο του νατρίου (Κ)	-38,4
37% φορμαλδευδη (Τ)	46,6
30% υπεροξείδιο του υδρογόνου (Ρ)	17,6

- ι) EN 374-4:2013 Τα επίπεδα αλλοίωσης υποδεικνύουν αλλαγές στην αντοχή στο τρίπημα των γαντιών μετά από έκθεση σε χημικές ουσίες.
δ) Αυτό το προϊόν παρέχει προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς. Τα γάντια δοκιμάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 16604:2004 και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 374-5:2016 για τη μέθοδο δοκιμής αντοχής στη διείσδυση παθογόνων του αίματος χρησιμοποιώντας τον βακτηριοφάγο Phi-X 174.
ι) Η αντοχή στη διείσδυση αξιολογήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και αναφέρεται μόνο στο ελεγμένο δείγμα.
ε) Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο προϊόν: συνθετικό λατέξ νιτριλίου (συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου, βουταδιενίου και μεθυλοακρυλικού οξέος), οξείδιο ψευδαργύρου (ΖnO), θείο (S), διοξείδιο τιτανίου (TiO2), διθειοκαρβαμικός διβουτυλικός ψευδάργυρος, βουτυλιωμένο προϊόν αντίδρασης π-κρεσόλης με δικυκλοπενταδιένιο, υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ), χρωστική ουσία, στεατικό ασβέστιο, χρωστική διασποράς. Ορισμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γαντιών μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες.

**5) Γάντια για ειδικές εφαρμογές (EN ISO 21420:2020)**

Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το δέρμα των χεριών από χημική μόλυνση. Το μήκος των γαντιών είναι επομένως μικρότερο από το συνολικό ελάχιστο μήκος γαντιών που απαιτείται από το πρότυπο EN, και ειδικώς τα γάντια θεωρούνται για „Ειδικό Σκοπό“.

**6) Οδηγίες χρήσης του προϊόντος**

**α) Κανόνες για τη χρήση γαντιών στην υγειονομική περιβάλψη:**

- Φοράτε κατάλληλα γάντια όταν χρειάζεται.
- Φοράτε τα γάντια για δύο ώρες το πολύ.
- Πλύνετε τα χέρια μετά την αφαίρεση των γαντιών.
- Τα γάντια μιας χρήσης πρέπει να απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση. Μην τα κρατάτε για μελλοντική χρήση.
- Αφαιρέστε τα γάντια πριν αγγίξετε προσωπικά αντικείμενα όπως τηλέφωνο, υπολογιστές και στυλό, καθώς και το δικό σας δέρμα.
- Μη φοράτε γάντια έξω από το χώρο εργασίας. Εάν χρειάζεστε γάντια για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο, βάλτε ένα γάντι στο χέρι που θα μεταφέρει το αντικείμενο.
- Εάν για οποιοδήποτε λόγο το γάντι αποτύχει και έρθουν σε επαφή χημικές ουσίες με το δέρμα, θεωρήστε αυτό έκθεση και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

**β) Επιλέξτε το σωστό μέγεθος** - Επιλέξτε το σωστό μέγεθος γαντιού. Μπορείτε να καταλάβετε αν τα γάντια είναι πολύ μικρά τεντώνοντας τα δάχτυλά σας.

**γ) Τοποθέτηση:**

- Αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα από τα δάχτυλα και τους καρπούς και πλύνετε τα χέρια πριν φορέσετε γάντια.
- Τοποθετήστε τα γάντια στην προετοιμασμένη επιφάνεια εργασίας.
- Περάστε το γάντι πάνω από το κυρίαρχο χέρι πάνωτάς το με το άλλο χέρι, αγγίζοντας μόνο το εσωτερικό του γαντιού και τραβώντας το πάνω από το κυρίαρχο χέρι, ώστε το γάντι να εφαρμόζει άνετα στα δάχτυλα.
- Με το κυρίαρχο χέρι με το γάντι, τραβήξτε το άλλο γάντι πάνω από το μη κυρίαρχο χέρι.
- Μόλις φορέσετε τα γάντια, μπορείτε να αγγίξετε το εξωτερικό μέρος του γαντιού για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά.

**δ) Αφαίρεση:**

- Με το κυρίαρχο χέρι σας, πιάστε το εξωτερικό του γαντιού του μη κυρίαρχου χεριού στην παλάμη κοντά στο περικόρπιο.
- Αφαιρέστε το γάντι από το μη κυρίαρχο χέρι και τυλίξτε το στην παλάμη του χεριού με το γάντι.
- Περάστε δύο δάχτυλα κάτω από τη μανσέτα του δεύτερου γαντιού και αφαιρέστε το προσεκτικά από το χέρι σας χωρίς να αγγίξετε τον καρπό σας, γυρνώντας το γάντι προς τα έξω και τραβώντας το πάνω από το πρώτο γάντι, το οποίο παραμένει διπλωμένο μέσα.

**ε) Απόρριψη** - Βεβαιωθείτε ότι απορρίπτετε σωστά τα χρησιμοποιημένα γάντια. Ακολουθήστε τις πολιτικές του ιδρύματός σας





**7) Χειρισμός και αποθήκευση**

Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος και προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες. Τα ανοιγτά κουτιά πρέπει να προστατεύονται από τον φθορισμό και το ηλιακό φως. Τα γάντια είναι συσκευασμένα σε συσκευασία δοσολογίας που είναι κατάλληλη για μεταφορά. Κρατήστε τα γάντια στο κουτί όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

**8) Διάρκεια ζωής**
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής.



Prstodujte si pokyny k pouziti
Preštudujte si pokyny na pouzitie
Read instructions for use
Przeczytaj instrukcje użytkownika
Lea las instrucciones de uso
Ler instructiões de uso
Cititi instrucțiunile de utilizare
Veuillez lire les instructions d'utilisation
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung
Olvassa el a használati utasítást
Gebruiksaanwijzingen goed doorlezen
Leggi le istruzioni per l'uso
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

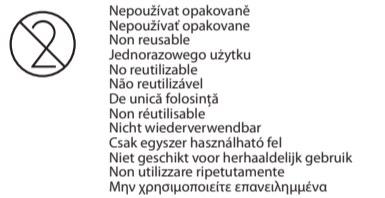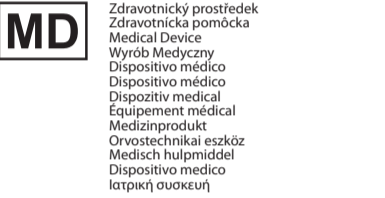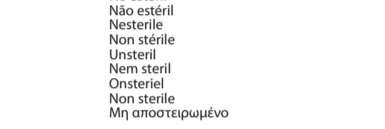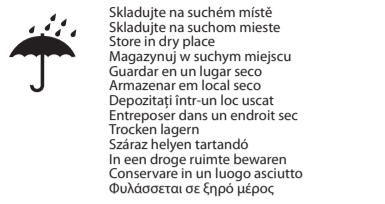

Nesterilní
Nesterilné
Nonsterile
Niesterylíny
No estéril
Nào esteril
Nesterile
Non stérile
Unsteril
Nem steril
Onsteril
Non sterile
Nή αποστειρωμένο

Zdravotnický prostředek
Zdravotnicka pomôčka
Medical Device
Wyrób Medyczny
Dispositivo médico
Dispositivo médico
Dispozitiv medical
Équipement médical
Medizinprodukt
Orvostechnikai eszköz
Medisch hulpmiddel
Dispositivo medico
Iaτρική συσκευή

Nepoužívat opakovaně
Nepoužívať opakovane
Non reusable
Jednorazowego użytku
No reutilizable
Nào reutilizável
De unică folosință
Non réutilisable
Nicht wiederverwendbar
Csak egyszer használható fel
Niet geschikt voor herhaaldelijk gebruik
Non utilizzare ripetutamente
Mην χρησιμοποιείτε επανειλημμένα



Manipulace s potravinami
Manipulácia s potravinami
Food handling
Obsługa żywności
Manipulación de alimentos
Manipulação de alimentos
Manipulare mâncare
Manipulation des aliments
Umgang mit Lebensmitteln
Élelmiszerkezelés
Voedselbehandeling
Manipolazione degli alimenti
Χειρισμός τροφίμων

